

# 図解かんたんセットアップ

(保管記録)

## メモリーモード呼び出し



グルコース・パイロット本体には、過去 350 回分の測定結果を、日付、時間とともに保存することができます。  
グルコース・パイロットの電源が OFF の状態で、**M ボタン**を押してください。

## 14 日平均値(28 測定分)



14日平均値は自動的に表れます。(注:この機能は血糖値の14日平均値【28測定分】をみるために使用されます)



## 過去の測定結果の確認



**S ボタン**を押すと、過去 350 回分の測定結果を個別に確認いただけます。  
“End”は最後の結果が出た後に表示され、自動的に電源OFFになります。

## 30 日平均値(128 測定分)



その後に、30日平均値が表れます。(注:この機能は血糖値30日平均値【128測定分】をみるために使用されます)