

図解かんたんセットアップ

(ランセット)

1. 本体からキャップの取り外し

反時計方向回し ↓ 引き出す



8. ランセットホルダーからランセットの取り外し

引き出す



7. 採血後、キャップの取り外し

反時計方向回し ↓ 引き出す



2. ランセットホルダーにランセットを挿入

挿入



ランシングデバイス

キャップ

ボタン

ランセット深度調整ダイヤル
深い:5 浅い:1

コッキング部

ランセット

保護部

廃棄: 国内法に従い、使用したランセットを適切に行う。

6. 採血の実施

注: ランセット深度調整ダイヤル選択

採血部に密着

ボタンを押す




3. ランセット保護部の切り外し

ねじり切り ↓ 取り外す



4. 本体にキャップを戻す

戻す

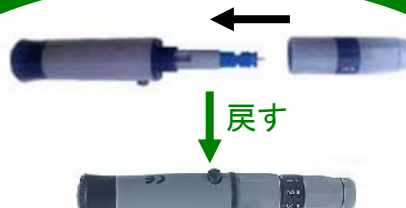

5. コッキング機構の始動準備

止まるまで ↓ 引く

